

CLARIONMASK REF	..CLG.../3VR/clg...
UTILISATION:	8 HEURES
FRÉQUENCE DE LAVAGE:	1 LAVAGE
NOMBRE MAXIMUM DE LAVAGES:	30 FOIS
EFFICACITÉ:	210 JOURS (1 lavage tous 7 jours pour 30 fois)



MASQUE CHIRURGICAL DE TYPE II

Destiné à limiter la transmission d'agents infectieux entre les personnes, les patients, le personnel clinique et le milieu environnant.

Performances ClarionMask:

- **Efficacité de filtrage (B.F.E.):** > 98%
- **Résistance au débit respiratoire:** < 17 Pa/cm²

Cinq couches de tissu:

- 1^o couche extérieure colorée: 100% cotton
- 2^o/3^o/4^o couches intermédiaires filtrantes: 3 couches superposées de fibrilles de polypropylène
- 5^o couche intérieure (en contact avec le visage): 100% cotton

TECHNOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES DU TISSU UTILISÉ

Le tissu utilisé pour la réalisation du produit est traité par **Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug, Suisse**, avec la formulation exclusive de la technologie Livinguard, qui inhibe mécaniquement l'activité des bactéries et des virus et empêche leur prolifération (en les éliminant de la surface); garantissant une protection prolongée et efficace contre les risques de contamination. Livinguard déclare et certifie:

- **Capacité d'inactivation du virus:** 99,9%

Protected By Livinguard: www.livinguard.com

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Pour usage personnel seulement. Ne pas utiliser si le dispositif est endommagé. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux composants.

REPLACEMENT

Le produit doit être remplacé au bout d'un an à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage et une fois que le maximum de lavages a été épuisé. Le produit utilisé doit être éliminé conformément à la législation sur la collecte sélective des déchets.

UTILISATION

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES ATTENTIVEMENT CHAQUE FOIS ON PORTE LA MASQUE

1. Ouvrez le sac et retirez le masque.
2. Placez le masque sur une main et rapprochez-le du visage.
3. Enfilez les élastiques derrière chaque oreille pour s'adapter confortablement au masque au profil du visage et utilisez les réglers pour étirer les élastiques eux-mêmes (la partie supérieure de chaque élastique - entre le masque et le régulateur - doit être plus court que cela plus bas, pour assurer une meilleure adhérence).
4. Ajustez la barre de pont nasal pour qu'elle s'adapte à l'huteur du nez.
5. Ajustez la partie inférieure du masque pour couvrir complètement le menton.
6. Le produit est destiné à un usage strictement personnel et, même après le lavage, il ne peut pas être utilisé par des personnes autres que le premier utilisateur.

Il est conseillé de laisser le masque dans un endroit sec à l'écart des sources de chaleur; se laver les mains après avoir touché ou lavé le masque pour éviter toute contamination croisée.

UTILISATION, STOCKAGE ET DURÉE DES PRODUITS

Avant d'utiliser le masque pour la première fois, assurez-vous que l'emballage est intact et scellé et que le produit est complet et adapté à l'application. Pour les utilisations ultérieures, assurez-vous qu'au préalable, le produit a été traité selon les instructions fournies et stocké dans un environnement sain à l'abri de sources de chaleur très élevées, avec une température comprise entre - 10 ° C et + 40 ° C et une humidité relative. moins de 80%.

Durée d'utilisation quotidienne maximale: 8 heures

Fréquence de lavage: tous les 7 jours, sauf pour différents besoins spécifiques

Lavages maximum: 30 lavages

Méthode de lavage: à la main à l'eau courante froide (max 30 °) sans aucun type de détergent et sans essorage, ne pas sécher à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas le sèche-linge et ne repassez pas.

Pour éviter de compromettre l'efficacité de filtrage du produit, ne pas altérer, remplacer ou endommager une partie de celui-ci.



CLARION LIVING SRL

Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 Novara (NO) - ITALIA

Tel: +39 0321 629249 - Fax: +39 0321 393720

Partita IVA e C.F.: 02631140031

Pec: clarionlivingsrl@pec.it - Email: info@clarion-living.com

Website: www.clarion-living.com

